






Was? Objekt, das gewartet werden soll	Wie? Art der Wartung	Womit? Produkt	Alternativ- produkt	Wann? Zeitpunkt, Rhythmus	Wer? Verantwortliche/r
 Einrichtungsgegenstände	Desinfektion / Reinigung	Spray In Sprüh-/ Flächendesinfektion konz. / 1 min. TopOff Tücher -gebrauchsfertig- 30 sec.		1. Anfang bzw. Ende des Behandlungstages 2. Nach der Behandlung	
 Flächen und Gegenstände	Desinfektion / Reinigung	Spray In Sprüh-/ Flächendesinfektion konz. / 1 min. TopOff Tücher -gebrauchsfertig- 30 sec.		Im Behandlungsbereich nach jeder Behandlung, sonst nach jeder Kontamination	
 Hände	Desinfektion Waschen	OP-SEPT Händedesinfektion hygienisch: 30 sec. chirurgisch: 3 min. Lotio Med		Falls erforderlich, vor bzw. nach der Behandlung oder bei Tätigkeiten mit Kontaminationsgefahr Bei Bedarf	
 Instrumente	Desinfektion / Reinigung	InstruExtra Instrumentendesinfektion gemäß DGHM 2% / 60 min. 3% / 30 min. 4% / 15 min.		Unmittelbar nach der Behandlung. Einwirkzeit: Nach der Liste der DGHM eine Stunde nach Einlegen des letzten Instruments! Nach der Einwirkzeit abspülen, kontrollie- ren, wenn nötig nachreinigen, mit Einmaltuch trocknen, hygienisch lagern. Einsortieren sofort nach der Behandlung. Lagerung im Gerät vor der Desinfektion nicht über 6 Stunden.	
	Sterilisation (Nach Desinfektion u. Reinigung)			NACH Desinfektion, Reinigung und ggf. Trocknung. ANSCHLIESSEND sterile Lagerung (Folie, Kassette etc.)	
 Rotierende Instrumente	Desinfektion / Reinigung	InstruStar R.F.U. Bohrerbad konz. / 1 min.		Sofort nach der Behandlung	
 Hand- und Winkelstücke, sowie Turbinen	Nach Vorschrift des Herstellers	Spray In Sprühdesinfektion konz. / 1 min.		Sofort nach der Behandlung	
 Absauganlage	Durchsaugen eines Wasser-/ Luftgemisches	1 L lauwarmes Wasser		Möglichst nach jeder Behandlung (bes. bei Blut)	
	Desinfizieren, reinigen: Langsames Durchsaugen eines Gemisches aus Luft, Desinfektions- und Reinigungs- mittel	InstruSuc Absauganlagendesinfektion 2% / 15 min.		Ende des Behandlungstages (-halbtages)	
	Filterwechsel			Nach Vorschrift des Herstellers	
 Räume insb. Fußböden	Wischen Saugen	Beta Guard Flächendesinfektion 3% / 15 min. 1% / 60 min. 0,5% / 120 min. Saugen folgender Räume:		Nach Bedarf arbeitstäglich	
 Abdrücke	Desinfektion / Reinigung	InstruPrint Abdruckdesinfektion konz. / 5 min.		Nach Bedarf	